



ÚS DE MASCARETA TRANSPARENT

Segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS), més de el 5% de la població mundial pateix algun tipus de pèrdua d'audició discapacitant.

Llegir els llavis i observar les expressions de la cara són vitals per a aquells que depenen de la comunicació visual, com la lectura labial o l'ús de la llengua de signes.

El fet de portar obligatòriament mascareta FFP2 o quirúrgica impedeix comunicar-se amb les persones que depenen de la comunicació visual.

Per això us facilitem, al personal d'aquest Ajuntament, que realitza principalment tasques d'atenció al públic, aquest tipus de mascareta transparent.


CAL TENIR EN COMPTE:

L'ús d'aquest tipus de mascareta ha de ser exclusivament per atendre a persones que depenguin de la comunicació visual, com la lectura labial o l'ús de la llengua de signes. Per a la resta de casos s'ha de realitzar l'ús de mascaretes FFP2 o quirúrgiques.

Traslladar-vos que aquest tipus de mascareta no està considerat ni té la certificació espanyola d'Equip Individual de Protecció (EPI) i **no garanteix la total protecció davant el COVID-19** (SARS-CoV-2).

Per a garantir la barrera de protecció caldrà complementar aquesta mesura (ús de mascareta transparent) amb barrera física mitjançant mampara de metacrilat, distanciament de seguretat d'1,5 metres i converses de menys de 15 minuts.

Imatge de la mascareta

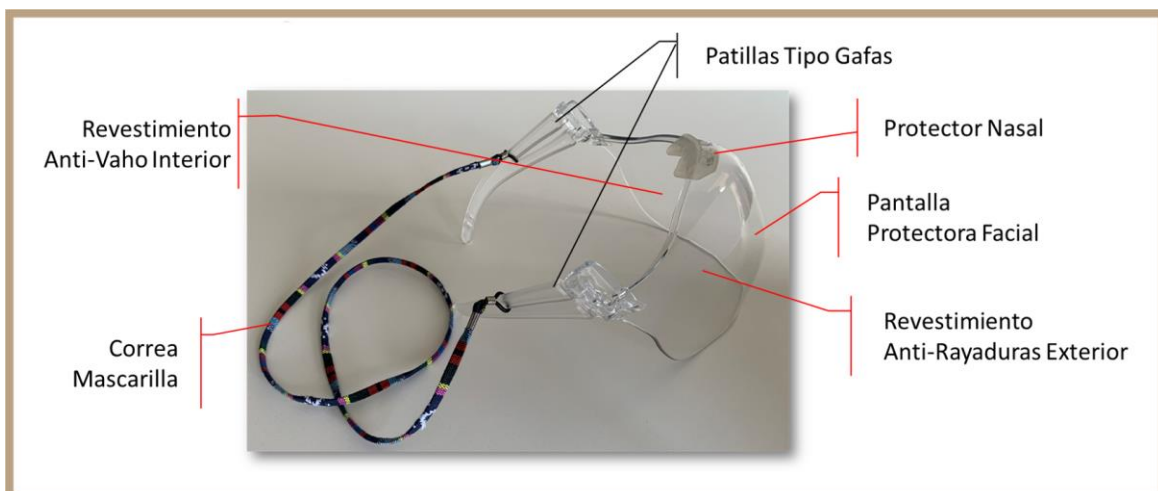



Característiques:

- Respectuós amb el medi ambient a causa de la seva llarga durada i al fet que és 100% reciclable.
- Còmoda i lleugera amb un pes de (51 gr)
- S'usa com unes ulleres, sense sensació d'asfíxia com les màscares tradicionals, i es pot usar amb les teves ulleres sense cap problema de forma còmoda.
- No tòxic.

Neteja i desinfecció: Netegeu o desinfecti la màscara després de cada ús.

Renteu totes les parts en aigua tèbia amb una solució sabonosa o detergent alcalí; després esbandida amb aigua corrent tèbia per eliminar qualsevol residu. No s'han d'utilitzar raspalls durs, abrasius o altres materials que puguin danyar les superfícies.

Desinfecció: Totes les peces fetes de PVC, silicona o policarbonat poden desinfectar utilitzant desinfectants disponibles al mercat que siguin adequats per a materials plàstics. S'ha de seguir la informació del fabricant sobre els temps d'exposició i les concentracions d'aplicació dels desinfectants. Observi també les instruccions de seguretat per al desinfectant de fabricant.

L'ús d'aquesta mascareta ha de ser personal, individual i intransferible.